

DIPHOTERINE



DIPHOTERINE

Instruções para
correta utilização
da solução de
descontaminante
químico





- **O que é?**

Solução de lavagem para primeiros socorros em acidentes químicos com apresentações específicas para descontaminação química e cutânea. Não repara tecido danificado.

- **Para que serve?**

Possui dupla ação, neutraliza e remove o agressor químico (ácido ou base), interrompendo a difusão/penetração do produto agressivo, corrosivo ou irritante na superfície cutânea ou ocular.

Propriedades do produto:

1. A Solução Diphoterine se apresenta na forma líquida e atende as expectativas necessárias de lavagem da superfície como as soluções de lavagem clássica.

2. A Solução Diphoterine é composta por uma molécula anfótero e quelante com múltiplos sítios ativos, capazes de agir na captura de moléculas de diferentes classes de substâncias químicas, as quais são responsáveis pelos seis tipos de reações químicas possíveis (ácido, base, oxidante, redutores, solventes, quelantes). A molécula anfótera da Solução Diphoterine atrai e aprisiona o ácido em seu sítio ativo básico, tornando-o inofensivo.

3. A Solução Diphoterine é hipertônica e graças à pressão osmótica, atrai o produto químico que já penetrou, de dentro para fora dos tecidos; a combinação dessas três propriedades permite que Solução Diphoterine descontamine totalmente a projeção química, dentro e fora dos tecidos, de forma polivalente e sem geração de calor, evitando todas as possíveis sequelas que tipo de acidente pode gerar.

OBS: NUNCA utilizar água como primeira lavagem em acidente com ácido, ela dilui o produto e o espalha para uma área maior, causando mais queimadura.

Lavador de Olhos Individual Estéril

Para ser usado dentro de 10 segundos após o acidente. Utilizar todo o conteúdo do frasco.

Antes de aplicar o Diphoterine nos olhos, verificar se o acidentado está em uso de lentes de contato e removê-las, pois o produto químico pode penetrar por trás dela causando maceração ou dissolvendo a lente.



Instrução de uso:

- Seguro firmemente em uma das mãos.
- Remova a tampa com auxílio do polegar.



- Com cuidado e com olho aberto posicione o frasco no olho atingido.
- Incline a cabeça para trás e permite que o líquido em excesso lava o olho por completo



MINI DAP (Ducha Autônoma Portátil)

Deve ser utilizado como primeira solução de lavagem.

Utilização: é recomendado a utilização de todo o conteúdo do MINI DAP na zona atingida pela projeção química.

As embalagens de 100 ml ou 200 ml permite descontaminar totalmente pequenas áreas do corpo, equivalentes a uma perna ou braço.

Após os 60 segundos caso não ocorra a utilização, acrescentar de 3-5 minutos de lavagem posterior.



Instrução de uso:

- Remova a tampa.
- Retire a roupa e objeto contaminado.



- Pressione o difusor em direção a área atingida, aplicando em toda a extensão.



DAP (Ducha Autônoma Portátil)

Para ser usado nos 60 segundos após o acidente. Utilizado para acidentes químicos com grande área corporal.

Ao aplicar o Diphoterine deve se removida a roupa junto aplicação do produto.



Instrução de uso:

- Remova o lacre de segurança, utilize a alavanca como apoio.



- Pressione o gatilho na mangueira de projeção em direção a parte atingida, retire toda a roupa e objeto contaminado de cima para baixo. aplicando em toda a extensão.



Orientações para todos os empregados:

É DEVER DE TODOS:

Garantir a limpeza e conservação nos abrigos de diphoterine.

É DEVER DE TODOS:

Relatar a saúde ocupacional sobre a necessidade do uso do produto em caso de acidente.

Fertilizantes



NOME DA UNIDADE - Locais dos Abrigos de Diphoterine

Inserir mapa da localidade e
sinalizações dos Abrigos de
Diphoterine

NOME DA UNIDADE MOSAIC

Editorial

Edição: nomes dos responsáveis

Fotos: nomes dos responsáveis

Aprovação

Supervisora de Saúde:

Gerente de EHS:

Gerência de Saúde:

Contatos:

Adicionar contato do Serviço de Saúde

Referência:

-Diphoterine®- Descontaminante Químico - Disponível em: www.globaltek.com.br



Termo de Compromisso

Eu _____

Empresa _____ Matrícula _____

Declaro ter recebido treinamento sobre o uso, guarda e conservação dos Diphoterine.

Me responsabilizo e comprometo a utiliza-lo apenas para a finalidade a que se destina.

Catalão, ____ de _____ de 20__

Assinatura

